

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

■ ORTHOSELF®

identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

■ MEDICALORTHO®

identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

GRAZIE PER AVER SCELTO LA QUALITÀ RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN

RO+TEN s.r.l. via Monte Cervino, 50
20043 - Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com info@roplusten.com

9DDCFG00640ITA01

lumboFIT[®]70

ORTHOSELF[®]

PR1-T1170
Corsetto lombosacrale

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI



È un dispositivo medico indicato nella prevenzione e nel trattamento delle patologie lievi del tratto lombare e lombosacrale, con un'azione di sostegno e di compressione mirata.

La struttura è costituita da un mix di materiali unico: posteriormente il tessuto AirX garantisce un'ottima traspirabilità e un giusto grado contenitivo; anteriormente il tessuto elastico esclusivo assicura una funzione contenitiva efficace e uniforme. Gli speciali tiranti elastici, espressamente progettati per garantire una trazione facilitata e controllata, e le stecche di rinforzo, ne completano l'azione. Di facile applicazione, traspirante, non sporchevole e molto piacevole nel design, procura sostegno, benessere e sollievo in ogni attività quotidiana.

Può essere indossato anche sopra gli abiti.

RO+TEN

stare meglio fa bene

CARATTERISTICHE



Tiranti in elastico millerighe con chiusura anteriore, per un sostegno variabile e personalizzato

Chiusura anteriore a velcro



Guide posteriori per l'inserimento di due stecche supplementari rinforzate (opzionali)

Struttura posteriore in tessuto traspirante AirX™



Stecche automodellanti di rinforzo integrate nel tutore (4 posteriormente e 2 anteriormente)

Struttura in fiocco di viscosa ed elastomero

INDICAZIONI

Lombalgie

Contratture muscolari paravertebrali

Lievi traumi della colonna lombosacrale

Decorso post-operatorio

Spondiloartrosi

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.



Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 *Aprire il corsetto e fissare provvisoriamente i tiranti in velcro sulle bande laterali.*
- 2 *Posizionare il corsetto in modo che l'etichetta arancione sia rivolta verso l'alto.*
- 3 *Tendere il corsetto e fissare bene con la chiusura a velcro centrale (fig.A).*
- 4 *Stringere il corsetto tendendo i tiranti (fig.B) e agganciandoli sulla banda velcrabile anteriore (fig.C).*
- 5 *Assicurarsi che il corsetto sia ben centrato sia anteriormente che posteriormente (fig.D).*

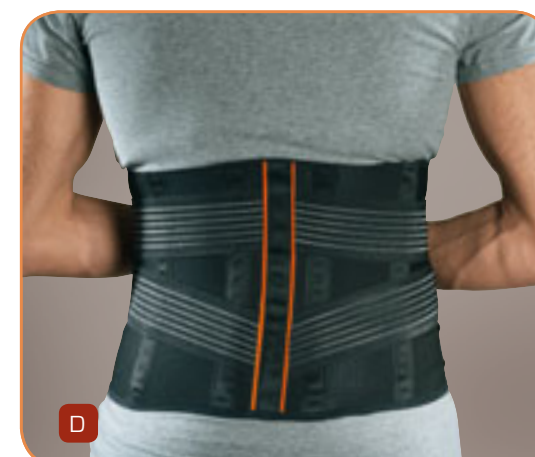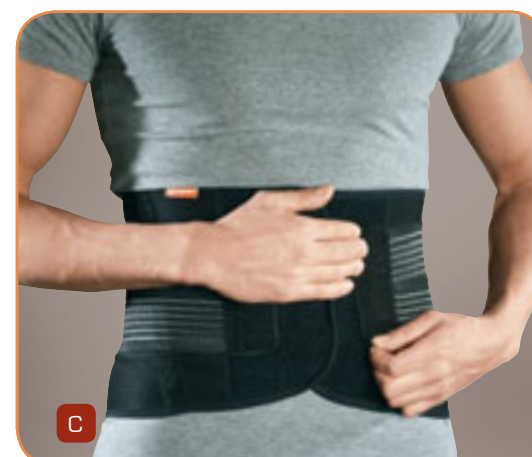

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.