

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

■ ORTHOSELF®

identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

■ MEDICALORTHO®

identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

GRAZIE PER AVER SCELTO LA QUALITÀ RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN

RO+TEN s.r.l. via Monte Cervino, 50
20043 - Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com info@roplusten.com

9DDCFG00720TA01

GENUFIT[®]20

ORTHOSELF[®]

PR3-G1120
Ginocchiera aperta
con aste articolate

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI



traspirante

È un dispositivo medico efficace nel coadiuvare l'articolazione del ginocchio, con un'azione di sostegno e di compressione mirata. Grazie alla struttura in tessuto AirX, eccezionalmente traspirante, e alle apposite aste articolate policentriche in alluminio fissate nelle apposite tasche in materiale flessibile, garantisce stabilizzazione latero-mediale, lasciando la massima libertà di movimento in flesso-estensione. Completamente aperta sul davanti è particolarmente comoda da indossare. Il nuovo sistema di chiusura brevettato con fibbia snodata Flex-O garantisce il continuo adattamento all'arto, evitando la rotazione in fase di applicazione e assicurando una migliore distribuzione delle pressioni. Dà sostegno e sicurezza ai soggetti con patologie legamentose lievi o problemi cartilaginei.

RO+TEN

stare meglio fa bene

CARATTERISTICHE

- Tasche in materiale flessibile fissa-aste e passa-cinghie
- Inserto popliteo in Soft-X® per un maggior comfort
- Foro rotuleo
- Sistema di chiusura brevettato Flex-O® con fibbia snodata e flettente, e cinghie di stabilizzazione
- Aste articolate policentriche
- Apertura frontale con linguette di chiusura a velcro
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante

INDICAZIONI

- Instabilità latero-mediale lieve o moderata
- Patologia del ginocchio senile
- Protezione da tensioni anomale sul ginocchio lesi in via di guarigione
- Lievi traumi del ginocchio
- Lievi stati artrosici
- Postumi dei traumi distorsivi del ginocchio
- Condromalacia rotulea associata a lassità dei legamenti

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

MANUTENZIONE

Sfilare le aste articolate (fig.I).

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

PRIMA APPLICAZIONE (per il medico/tecnico ortopedico)

- 1 Aprire tutti i velcri richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.
- 2 Avvolgere il tutore attorno al ginocchio, con l'etichetta arancione rivolta verso l'alto, centrando l'apertura sulla rotula e chiudere i velcri di posizionamento sopra e sotto il ginocchio (fig.A).

Se necessario, togliere la ginocchiera, sfilare le aste dalle tasche (fig.I) e modellarle (fig.II) per adattarle alla forma della gamba.

Quindi reinfilare le aste nelle tasche e applicare nuovamente la ginocchiera.



- 3 Infilare i due terminali ad Y della cinghia superiore nella corrispondente fibbia, tirare simmetricamente con le due mani e fissare a velcro (fig.B). Ripetere l'operazione con la cinghia inferiore (fig.C).

Se necessario, accorciare le cinghie:

- a). Togliere i velcri ad Y all'estremità della cinghia (fig.III).
- b). Tagliare la parte sovrabbondante di cinghia (fig.IV).
- c). Riapplicare i velcri ad Y (fig.III).



APPLICAZIONI SUCCESSIVE (per il paziente)

- 1 Aprire tutti i velcri richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.
- 2 Avvolgere il tutore attorno al ginocchio, con l'etichetta arancione rivolta verso l'alto, centrando l'apertura sulla rotula e chiudere i velcri di posizionamento sopra e sotto il ginocchio (fig.A).
- 3 Infilare i due terminali ad Y della cinghia superiore nella corrispondente fibbia, tirare simmetricamente con le due mani e fissare a velcro (fig.B). Ripetere l'operazione con la cinghia inferiore (fig.C).